

**CALIBRATORE LIOFILO URINARIO PER SOSTANZE D'ABUSO**  
(Metadone)

**Cod. calibratore: CC48016**

**OBIETTIVO**

Questi calibratori urinari sono usati per calibrare il sistema analitico nella determinazione quantitativa delle droghe d'abuso in essi contenute. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su 5 punti.

**RICOSTITUZIONE**

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 5 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

**STOCCAGGIO E STABILITA'**

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 2 giorni a 2-8 °C e 2 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

**PRECAUZIONI**

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
006	Jan 2013	Jan 2016

**CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:**

- CC48016 CALIBRATORE URINARIO PER SOSTANZE D'ABUSO -Metadone-

5 x 2 x 5 ml

CONCENTRAZIONI

COD.

CC48016

		
006	Jan 2013	Jan 2016

Calibratore

<i>ANALITA</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE</i>	<i>VALORE MEDIO OTTENUTO ± DS*</i>
METADONE -1-	ng/ml	0	0
METADONE -2-	ng/ml	100	107.4 ± 3.4
METADONE -3-	ng/ml	220	239.3 ± 5.1
METADONE -4-	ng/ml	400	430.1 ± 5.8
METADONE -5-	ng/ml	1000	1035.0 ± 65.4

**FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY**

EUREKA srl – LAB DIVISION  
VAT N° 01547310423  
E-mail: info@eurekaone.com  
www.eurekaone.com



Head Quarter:  
Via Enrico Fermi 25  
60033 Chiaravalle (AN) ITALY  
Tel. +39 071 7450790  
Fax + 39 071 7496579



Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

Release N° 003

Ottobre 2010