



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALIBRATORE LIOFILO PLASMATICO PER 25-OH-VITAMINA D₃ e 25-OH-VITAMINA D₂

Cod. Z19116
DA USARE CON I KIT CODICE Z19810-Z19815

OBIETTIVO

Questi calibratori plasmatici sono usati per calibrare il sistema HPLC nella determinazione quantitativa dell'analita in essi contenuti. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su un punto. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE




Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 5 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a - 20 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

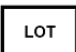


Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
019	Oct 2022	Oct 2025

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z19116 CALIBRATORE PLASMATICO PER 25-OH-VITAMINA D₃ e VITAMINA D₂ 4 x 5 ml

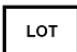CONCENTRAZIONI**COD. Z19116**

		
019	Oct 2022	Oct 2025

<i>ANALITA</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE</i>
25-OH-VITAMINA D ₃	ng/ml	66,4
25-OH-VITAMINA D ₂	ng/ml	35,1

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

**FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY**

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 13485 =

EUREKA srl – LAB DIVISION ,
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. + 39 071 74 50 790
Fax. + 39 071 74 96 579
info@eurekaone.com
www.eurekakit.com



Release N° 003

Maggio 2019