



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS  
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

## CALIBRATORE LIOFILO URINARIO PER CATECOLAMINE (Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina)

**Cod. Z10116**

**USARE CON I KIT CODICE Z10710, Z10610, Z10560**

### OBIETTIVO

Questi calibratori urinari sono usati per calibrare il sistema HPLC nella determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su un punto. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

### RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 5 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

### STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 3 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

### PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

036	Jan 2024	Jan 2027

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:




- Z10116 CALIBRATORE URINARIO PER CATECOLAMINE

4 x 5 ml

**CONCENTRAZIONI**

**COD.**

**Z10116**

		
036	Jan 2024	Jan 2027

<b>ANALITA</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE</b>
<b>NORADRENALINA</b>	<b>µg/l</b>	<b>245,0</b>
<b>ADRENALINA</b>	<b>µg/l</b>	<b>49,8</b>
<b>DOPAMINA</b>	<b>µg/l</b>	<b>492,8</b>

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



**FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY**

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS  
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 13485 =

**EUREKA srl – LAB DIVISION ,**  
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY  
Tel. + 39 071 74 50 790  
Fax. + 39 071 74 96 579  
[info@eurekaone.com](mailto:info@eurekaone.com)  
[www.eurekakit.com](http://www.eurekakit.com)



**Release N° 003**

**Maggio 2019**