



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLI LIOFILI PLASMATICI PER CLOZAPINA/NORCLOZAPINA – LIVELLI 1 e 2

Cod. Z76019

OBIETTIVO

Questi controlli plasmatici sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

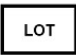


Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 2 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2–8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 1 giorno a 2-8 °C e 12 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
017	Apr 2024	Apr 2027

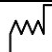

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z76019 CONTROLLO PLASMATICO PER CLOZAPINA/NORCLOZAPINA - LIVELLI 1 e 2 2 x 5 x 2 ml

Release N° 003

Maggio 2019

CONCENTRAZIONI
COD. Z76019

LOT		
017	Apr 2024	Apr 2027

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO L1	RANGE L1	VALORE MEDIO L2	RANGE L2
NORCLOZAPINA	µg/l	72,8	51,0 – 94,7	699,1	489,4 – 908,8
CLOZAPINA	µg/l	79,7	55,8 – 103,5	997,0	697,9 – 1.296,1

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

CE

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

EUREKA srl – LAB DIVISION ,
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. + 39 071 74 50 790
Fax. + 39 071 74 96 579
info@eurekaone.com
www.eurekakit.com



AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 13485 =

Release N° 003

Maggio 2019